

### 1. LABORATORIO CHE ESEGUE L'ANALISI

Il campione da lei raccolto verrà analizzato presso il laboratorio TOMA Advanced Biomedical Assays Spa (in breve "TomaLab") presso la sede di Busto Arsizio (VA).

TomaLab è tra i più grandi laboratori di genetica in Italia attivo a più di 40 anni, accreditato dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia come Laboratorio Clinico Generale con Patologia Clinica e Microbiologia e Virologia; Laboratorio Specialistico di Anatomia Patologica con Diagnostica Molecolare Somatica; Laboratorio Specialistico di Genetica Medica con Citogenetica e Genetica Molecolare che comprende anche un'area dedicata alla Genetica Forense. Per maggiori informazioni, può visionare il sito istituzionale [www.tomalab.it](http://www.tomalab.it).

### 2. ISTRUZIONI OPERATIVE

#### a) Modulistica per il primo invio

E' fondamentale che per il primo invio di campioni venga compilata la "**Scheda Raccolta Dati del Centro**" qui allegata per poterla registrare come cliente ed inviarle le credenziali per la visualizzazione dei referti dal portale [www.tomalab.it](http://www.tomalab.it)

#### b) Pagamento dell'esame

Il costo dell'esame è di **156 €** e sarà fatturato da Tomalab al centro indicato nella "Scheda Raccolta Dati del Centro"

La fattura elettronica sarà inviata su SDI, mentre copia di cortesia sarà mandata per mail intorno al 10 del mese successivo l'invio dei campioni.

Il pagamento è da eseguirsi mediante bonifico entro 30 gg DFFM.

#### c) Risultati dell'esame

I referti saranno disponibili sul sito [www.tomalab.it](http://www.tomalab.it) nella sezione "SCARICA REFERTI". Le credenziali d'accesso le saranno inviate per mail alla ricezione della "Scheda Raccolta Dati del Centro". Le giungerà sulla mail indicata nel modulo anche la notifica di quando il referto è pronto per essere visualizzato.

### 3. SPEDIZIONE

#### a) Confezionamento

Il tampone per la raccolta delle cellule ha una stabilità a temperatura ambiente di 30 giorni dal prelievo.

Per ogni tampone va compilata il MODULO DI ANAMNESI TEST STUDIUM GENETICS SG-OCRA da parte del professionista a cui si fa riferimento, NON indicando le generalità del paziente che devono rimanere anonime e a conoscenza esclusivamente dello stesso professionista.

Viene fornito per le spedizioni questo materiale:



1. 1 busta BioHazard
2. 1 busta dotata di pallini ad aria
3. Una busta TNT per la spedizione

Il campione biologico prelevato va riposto nella busta BioHazard.

Le buste BioHazard, il MODULO DI ANAMNESI TEST STUDIUM GENETICS SG-OCRA e la “Scheda Raccolta Dati del Centro” (se si tratta del primo invio) vanno riposte nella busta di carta dotata di pallini ad aria, quindi nella busta di plastica TNT.

#### **b) Richiesta di spedizione**

Una volta confezionato la busta per la spedizione, inviare una mail a [ritiri@tomalab.com](mailto:ritiri@tomalab.com) chiedendo la presa del materiale. La presa verrà organizzata da lunedì a venerdì, nel giorno successivo la richiesta.

Nel testo della mail esplicitare:

- 1- Che si richiede il ritiro dei campioni
- 2- Luogo del ritiro
- 3- Giorno ed eventuale fascia oraria di ritiro
- 4- Numero di telefono e contatto operativo
- 5- Che si richiede la generazione del DDT (Documento Di Trasporto) per la spedizione di campioni

Il laboratorio TOMALAB vi invierà il DDT per la presa che dovrà essere stampato e posizionato nell'apposita tasca della busta TNT fornita

#### **4. CONTATTI TOMALAB**

Contattare la segreteria Tomalab al numero 0331/652911 dal lunedì al venerdì dalle h10:30 alle h18:00 o via mail all'indirizzo [segreteria@tomalab.com](mailto:segreteria@tomalab.com).